

1 Účel použití

Rychlý test Dynamiker SARS-CoV-2 Ag, postranní průtokový test určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu ze SARS-CoV-2 přímo z výtěru z přední nosní dírky. Souprava je určena pro použití zdravotnickými pracovníky nebo vyškolenými pracovníky, kteří jsou obeznámeni s rychlými bočními testy průtoku.

Výsledky jsou pro identifikaci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Antigen je obecně detekovatelný ve stěrech z přední nosní dírky během akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, ale ke stanovení stavu infekce je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi.


2 Specifikace

Specifikace	Jedno testovací balení
Metoda	Imunochromatografie koloidního zlata
Specimen:	Nosní výtěr (neinvasivní)
Určeno pro:	Detekce antigenu SARS-CoV-2 ve výtěru z přední nosní dírky
Přeprava a skladování:	2-30 °C
Doba testu:	10 minut


3 Komponenty

Testovací Kazeta	1 testovací kazeta 1 zobrazovací destička
Extrakční pufer	1 nádobka
Pipeta	1 kus
Vatička do nosu	1 kus
Uživatelský manuál	1 kus


4 Operation Flow Chart

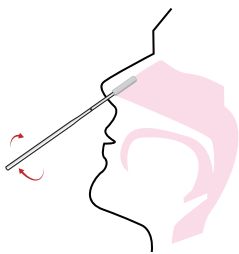


Vložte celou dodávanou špičku tamponu (obvykle 1/2 až 3/4 palce nebo 1 až 1,5 cm) dovnitř nosní dírky.

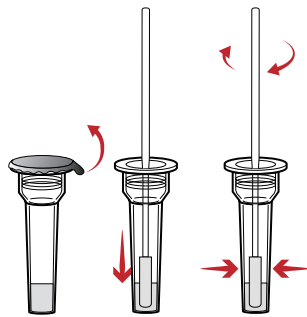

Odtrhněte těsnění extrakční nádoby. Vložte tampon (nejdřív do nosu pak) do extrakční zkumavky. Otáčejte tamponem nejméně 6krát a přitom tlačte špičkou proti dnu a zároveň po stranách extrakční trubice. Poté přidejte tekutinu alespoň na 1 minutu.

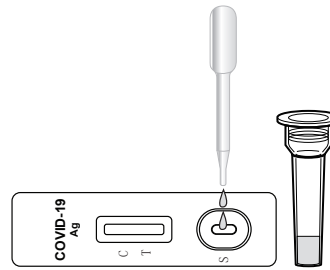

Vyjměte testovací kazetu a položte ji na čistý a rovný stůl. Pomocí pipety přeneste 2 kapky z extrakční nádoby na vzorkovou podložku.

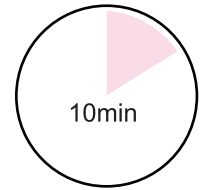

Odečtete a zaznamenejte výsledky po 10 minutách (ne déle než 20 minut). Po 20 minutách se mohou objevit neobvyklé výsledky.

5 Interpretace výsledků

Přítomnost dvou červených čar, zkušební linie (T) a kontrolní linie (C), indikuje Antigeny nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2 přítomné ve vzorcích.

Pozitivní (+):

Indikuje vzhled jedné kontrolní linie (C), žádná červená testovací linie (T) nepřítomnost antigenů nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2 přítomných ve vzorcích.

Negativní (-):

Nezobrazuje se žádná červená kontrolní čára (C). Neplatné výsledky mohou být způsobeny nesprávnou obsluhou nebo ztrátou e fci cacy v testech. Nejprve test opakujte, pokud problém přetrvává, přestaňte používat produkty se stejným číslem šarže a požádejte o podporu místního distributora.

Neplatný:



Dovozce & Distributor:
LEFEEN s.r.o.
 Rybná 716/24, 11000 Praha 1
 Tel.: +420777178296
 Tel.: +420777084988
 www.lefeen.com/covidtesty
 e-mail: covidtesty@lefeen.com



Pro více informací a nákup testu naskenujte QR kód