




丹娜生物
DNK

LEFEEN
Medical Technologies

ISO 13485
CE

RoHS
REACH
S
ST

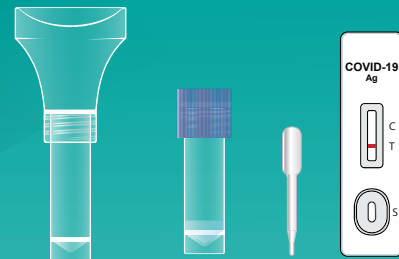

COVID-19 TEST ZA 10 minut

1 Test, 20 Test/kit

Spit

Dynamiker SARS-CoV-2 Ag RM(M)

-ER


1 Účel použití

Rychlo test Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (ze slin), laterální test určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu ze SARS-CoV-2 ve slinách od osob podezřelých z COVID-19. Určeno pro použití laickou veřejností pro samostestování.


2 Specifikace

Specifikace	20 testů v balení / 1 test	Použití pro:	Kvalitativní detekce antigenu nukleokapsidového proteinu ze SARS-CoV-2 ve slinách od osob podezřelých z COVID-19
Metoda	Imunochromatografie koloidního zlata	skladování a přeprava:	2-30 °C
Vzorek	Nasofaryngeální / orofaryngeální / sliny	Doba výsledku:	10 minut


3 Diagram použití

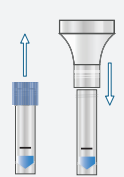


1 Otevřete trubici extrakční nádoby. Našroubujte nálevku pro odběr slin na trubici nádoby.




2 Plivněte do trychtýře a získajte objem až po rysku 1 ml (pufr + sliny).

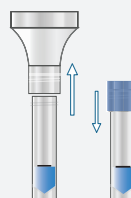


3 Sejměte nálevku a poté uzavřete trubici nádoby šroubením modrého víčka; Zkumavkou protřepejte, abyste promíchali nádobu a sliny.

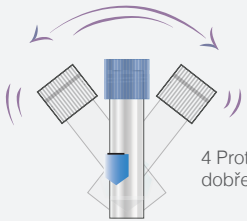

4 Protřepejte a dobře promíchejte.

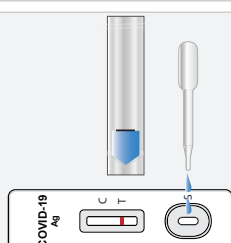

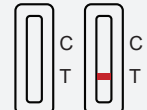


5 Položte zkušební kazetu na rovný a čistý stůl; pipetou přidejte 2 kapky vzorků směsi slin.

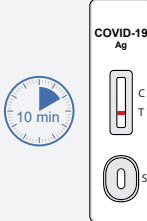

6 Odečtěte a zaznamenejte výsledky po 10 minutách (ne déle než 20 minut). Po 20 minutách se mohou objevit neobvyklé výsledky.

4 Result interpretation

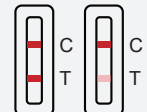Pozitivní		Přítomnost dvou červených linií, testovací linie (T) a kontrolní linie (C), indikuje přítomnost antigenů nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2.
Negativní		Vzhled jediné kontrolní linie (C), žádná červená testovací linie (T), indikuje nepřítomnost antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2 ve vzorcích.
Neplatný		Nezobrazuje se žádná červená kontrolní čára (C). Neplatné výsledky mohou být způsobeny nesprávnou obsluhou nebo ztrátou účinnosti v testech. Nejprve test opakujte, pokud problém přetrvává, přestaňte používat produkty se stejným číslem šarže a požádejte o podporu místního distributora.

Dovozce & Distributor:
LEFEEN s.r.o.
 Rybná 716/24, 11000 Praha 1
 Tel.: +420777178296
 Tel.: +420777084988
www.lefeen.com/covidtesty e-mail: covidtesty@lefeen.com



Pro více informací
a nákup testu
naskenujte QR kód